



clinell®

www.clinell.com

BREED
WERKINGSSPECTRUM,
KORTE
CONTACTTIJDEN

UNIVERSAL WIPES

VOOR HET REINIGEN EN ONTSMETTEN VAN
OPPERVLAKKEN, HANDEN EN APPARATUUR

Multifunctioneel

Werkt als ontsmettingsmiddel en reinigingsmiddel, waardoor verschillende soorten doekjes en oppervlaktereinigers niet langer nodig zijn.

Bewezen doeltreffendheid

Doodt ten minste 99,99 % van de bacteriën en virussen vanaf 10 seconden.

Dermatologisch getest

Bevat aloë vera en hydraterende bestanddelen waardoor ze mild zijn voor de huid.

Bewezen doeltreffendheid tegen:

MRSA, Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, Norovirus, Coronavirus en nog veel meer.

Antimicrobiële doekjes voor het reinigen en ontsmetten van oppervlakken, handen en apparatuur



Doodt ten minste 99,99 % van de bacteriën en virussen, waaronder het coronavirus.

- ✓ Multifunctionele reinigings- en ontsmettingsoplossing
- ✓ Doeltreffend vanaf 10 seconden
- ✓ Doodt ten minste 99,99 % van de bacteriën en virussen
- ✓ Kan worden gebruikt op zichtbaar vuile handen, in tegenstelling tot alcoholgels
- ✓ Ideaal voor situaties waarin u niet over water en zeep beschikt
- ✓ Dikke, stevige spunlace doekjes, geschikt voor frequent gebruik

GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR DE HANDEN

Wrijf de handen gedurende 60 seconden volledig in.

1.

Wrijf handpalm tegen handpalm schoon.

2.

Wrijf de rug van elke hand met de palm van de andere hand schoon, met de vingers in elkaar gevlochten.

3.

Wrijf de handpalmen tegen elkaar met de vingers in elkaar gevlochten.

4.

Wrijf de achterkant van de vingers in de palm van de andere hand met de vingers bij elkaar.

5.

Klem elke duim in de andere hand en wrijf met draaiende bewegingen schoon.

6.

Wrijf de vingertoppen in de palm van de andere hand met cirkelvormige bewegingen schoon.

7.

Wrijf elke pols met de andere hand schoon.

8.

Werp het doekje weg in de juiste afvalbak.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR OPPERVlakKEN

1.

Haal een doekje uit de verpakking.

2.

Veeg in S-vormige bewegingen van schoon naar vuil.

3.

Werp het doekje weg in de juiste afvalbak.

4.

Laat drogen aan de lucht.

BACTERIËN	TEST	TIJD
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	EN13727	10 sec.
<i>Klebsiella pneumoniae</i> (ESBL)	EN13727	10 sec.
<i>Staphylococcus aureus</i>	EN13727	10 sec.
<i>Enterobacteriaceae</i> (CRE)	EN13727	10 sec.
<i>Escherichia coli</i>	EN13727	10 sec.
<i>Listeria monocytogenes</i>	EN13727	10 sec.
<i>Campylobacter jejuni</i>	EN13727	10 sec.
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	EN13727	10 sec.
<i>Acinetobacter baumannii</i>	EN13727	10 sec.
<i>Salmonella typhimurium</i>	EN13727	10 sec.
MYCOBACTERIËN		
<i>Mycobacterium smegmatis</i>	EN14348	10 sec.
<i>Mycobacterium terrae</i>	EN14348	10 sec.
GISTEN EN SCHIMMELS		
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN16615	2 min
<i>Candida albicans</i>	EN13624	10 sec.
<i>Candida auris</i>	EN13624	10 sec.
VIRUSSEN		
Adenovirus	EN14476	30 sec.
Influenza (H1N1)	EN14476	30 sec.
Norovirus	EN14476	30 sec.
Hepatitis B	ASTM 1052	60 sec.
Hepatitis C	EN14476	60 sec.
MERS-Cov (humaan Coronavirus)	EN14476	60 sec.
SARS-CoV-2 (COVID-19 Virus)	EN14476	30 sec.
HANDONTSMETTING		
Hygiënische handontsmetting	EN 1500	60 sec.

WAAR TE GEBRUIKEN:

Deze lijst is niet volledig.

HANDEN

TABLETS/ TELEFOONS

BRANCARDS

WACHTKAMERS

DEURKRUKKEN

TOETSENBORDEN

LICHTSCHAKELAARS

BADKAMERS

PRODUCT	VERPAKKINGSEENHEID	NON-WOVEN	AFMETINGEN	TYPE DEKSEL	BIOCIDE PRODUCTTYPE	PRODUCTCODE
Universal Wipes 100	100 doekjes	Spunlace 60 g/m ²	26 x 18 cm	Plastic deksel	PT1 en PT2	BCW100BE

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.